

Viscot Medikal XL Cilt İşaretleme Kalemı

Kullanım Kılavuzu

- 1- Hastanı cildi üzerindeki yağı alkol veya su-sabun ile gideriniz. Bölgeyi kurulayınız.
- 2- Gerekli insizyon yerlerini işaretleiniz. Mürekkebin kuruması için biraz zaman tanıyınız.
- 3- Cildi Povidine-iodine (Betadine) solüsyonu ile dezenfekte ederek hazırlayınız. Mürekkep işaretlerinin rengi biraz solabilir ancak okunur halde kalacaktır.
- 4- İşaretlediğinizi çizginin hemen yanından insizyonu gerçekleştiriniz.
- 5- İşaretleri genel olarak hazırlıkta kullanılan solüsyonlarla (Betadine, Chloroprep vb. gibi.) kuvvetlice ovarak çıkarabilirsiniz. Alkollü bez de kullanabilirsiniz. İşaretler, banyo sırasında da birkaç gün içinde doğal olarak kaybolacaktır.

ÖNEMLİ

- 1- Enfeksiyondan korunmak için sadece tek bir hasta kullanımı içindir.
- 2- Kullandıktan sonra imha ediniz.
- 3- Yeniden sterilize etmeyiniz.
- 4- İşaretlemeden önce cilt yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır.
- 5- Hastaların Kantaron Moruna karşı duyarlılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
- 6- Kalemı kullanırken mürekkebin uçmasını önlemek için kullanımdan sonra ucunu kapatarak muhafaza ediniz.
- 7- Lütfen son kullanım tarihi geçen ürünü imha ediniz.

Detaylı bilgi için www.viscot.com

10.12.2011

DFU-4 Rev-1